



Model No. EW3106

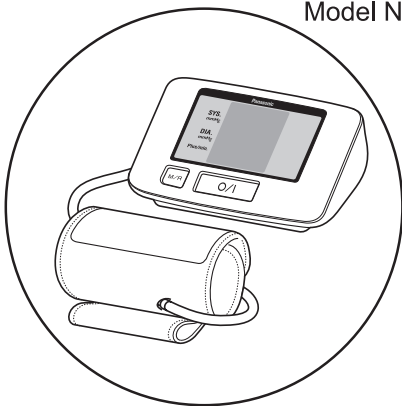


Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van de bloeddrukmeter van Panasonic. Al meer dan tien jaar levert Matsushita bloeddrukmeters aan onze klanten in Europa. Het door u gekochte apparaat heeft onze strenge kwaliteitscontroles doorstaan, en wij hopen dat u hierdoor een apparaat hebt waarmee u dagelijks efficiënt uw bloeddruk kunt meten. Wij wensen u al het beste voor uw gezondheid.

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

Controleer het instrument.

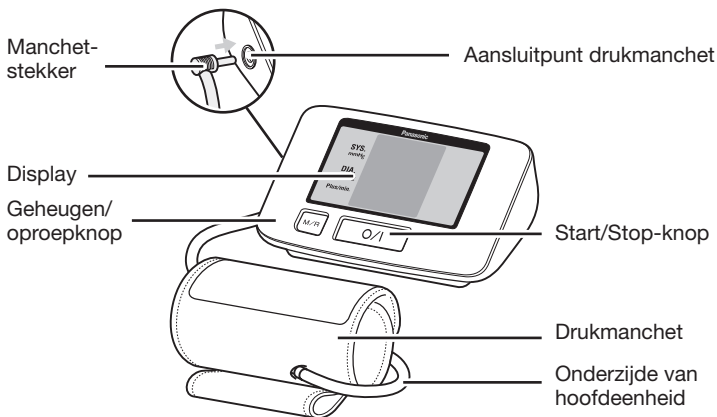

Onderzijde van hoofdeenheid

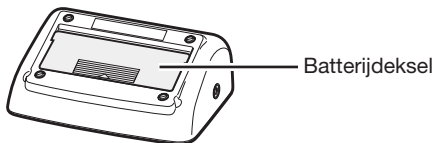


BATTERIJEN PLAATSEN

* Batterijen zijn niet inbegrepen. Koop deze afzonderlijk.

* Gebruik altijd alkalinebatterijen.

(Vier LR6-alkalinebatterijen van AA-formaat)

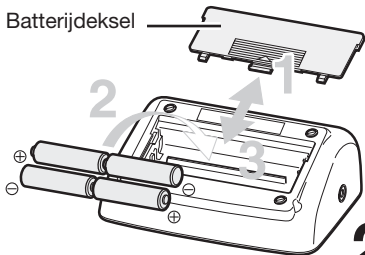

1 Draai de hoofdeenheid om, oefen lichte druk uit op het symbool Δ op het batterijdeksel en verwijder het deksel door dit in de richting van de pijl te verschuiven.

2 Zorg ervoor dat de plus- en minzijde van de batterijen aan de juiste zijde liggen.

3 Plaats het batterijdeksel terug en schuif dit dicht.

VOORZICHTIG:

- Houd u altijd aan de veiligheidsaanwijzingen op de batterijen.
- Zorg ervoor dat de plus- en minzijde van de batterijen aan de juiste zijde liggen.
- Legde batterijen moet u direct verwijderen.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Batterijen moet u gebruiken voordat de houdbaarheidsdatum hiervan is verstreken.


Als u batterijen gebruikt na de houdbaarheidsdatum, kan iets hiervan het gevolg zijn of het omringende gebied vervuild raken door hitte, barsten of lekken.

Vervang batterijen in de volgende gevallen:




- Tijdens gebruik verschijnt het links getoonde symbool.
 - Alle displaygegevens worden een kort moment verlicht nadat u de Start/Stop-knop indrukt. Daarna wordt het display leeg.
 - Ook als de Start/Stop-knop wordt ingedrukt, verschijnen geen gegevens op het display.
-
- Met een set nieuwe alkalinebatterijen (vier LR6-batterijen van AA-formaat) van Panasonic kunt u circa 500 metingen verrichten (dat is circa 5 maanden als u driemaal per dag een meting uitvoert). (Meetcondities: Kamertemperatuur: 22°C; Drukopbouw tot 170mmHg; Omtrek bovenarm: 30 cm)
 - De gebruiksduur van batterijen is mogelijk korter als u andere batterijen dan van Panasonic gebruikt. Als u mangaanbatterijen of andere alkalinebatterijen gebruikt, is de gebruiksduur 1/6 korter dan de gebruiksduur van alkalinebatterijen van Panasonic.
 - Zorg ervoor dat u eenmaal per jaar de batterijen vervangt. Als u de vervanging van batterijen uitstelt, kan door lekkage schade optreden.
 - Als u batterijen vervangt, gebruik dan altijd vier nieuwe alkalinebatterijen van hetzelfde type en van dezelfde fabrikant.
 - Als de kamertemperatuur laag is, wordt de gebruiksduur van de batterijen mogelijk korter.

DE DRUKMANCHET AANBRENGEN

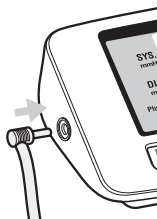


<Als u de manchet om de linkerarm wikkelt>

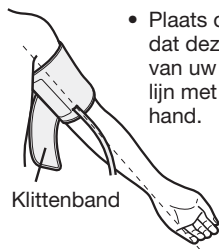

Klittenband

- Plaats de slanguitlaat zo dat deze op de palmzijde van uw arm ligt, op één lijn met de pink van uw hand.

<Als u de manchet om de rechterarm wikkelt>

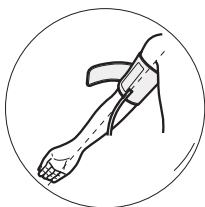

Circa 2 tot 3 cm vanaf de binnenzijde van uw elleboog



1 Steek de stekker in het aansluitpunt.

- Steek de stekker van de drukmanchet in zijn geheel naar binnen.

2 Wikkel de manchet om uw bovenarm.

- Wikkel de manchet om een blote arm.


De bloeddrukmeter kunt u gebruiken aan beide bovenarmen. Aangezien wordt verondersteld dat het verschil in bloeddruk tussen de linkerarm en rechterarm circa 10mmHg is, dient u ervoor te zorgen dat u uw metingen altijd uitvoert aan dezelfde arm.

3 Maak de manchet zo vast dat er tussen de manchet en de arm geen tussenruimte is, maar let er ook op dat de manchet niet te strak zit.

- Let erop dat uw kleding niet bekneeld raakt tussen de manchet als u deze om uw arm wikkelt. (Als dat wel gebeurt, zal het meetresultaat minder nauwkeurig zijn.)
- Druk de klittenband goed tegen elkaar.

HOE U EEN NAUWKEURIGE METING UITVOERT

Voer een meting uit terwijl u stilzit in een ontspannen houding.

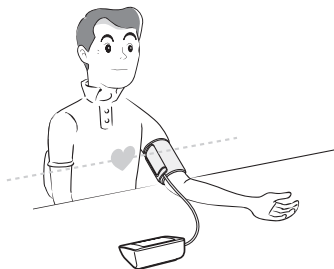

- 1** Laat uw ellebogen rusten op een tafel, etc.
- 2** Plaats uw arm zo dat de drukmanchet **zich ter hoogte** van uw hart bevindt.
- 3** Houd uw handpalm naar boven gericht, en **ontspan uw hand.**

Voer elke dag bovenarmmetingen uit aan dezelfde zijde in dezelfde positie op hetzelfde tijdstip.

- De meetresultaten zullen verschillen afhankelijk van de hoogte van de drukmanchet.
- Voer een meting uit in de ochtend onmiddellijk nadat u wakker wordt, als u geen aandrang hebt om te urineren. Als dit moeilijk is, voer dan een meting uit vóór het ontbijt en voordat u veel hebt bewogen.

Tijdens de metingen moet u zich ontspannen en stilzitten in een natuurlijke houding.

- Blijf altijd eerst circa 4 tot 5 minuten stilzitten voordat u een meting uitvoert.
- Ontspan uw lichaam, arm en vingers, en span de spieren hiervan niet aan.
- Praat niet tijdens een meting.
- Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van uw lichaam.
- Raak tijdens de meting de hoofdeenheid en de slang niet aan.

[VOORZICHTIG]

Blijf uit de buurt van mobiele telefoons en andere bronnen van elektromagnetische straling. Anders kunnen storingen optreden.



VOORZORGSMATREGELEN

In de volgende situaties is een nauwkeurige meting niet mogelijk.

- ☐ Binnen 1 uur nadat u hebt gegeten of alcohol hebt gedronken
- ☐ Onmiddellijk na het drinken van koffie of thee, of onmiddellijk nadat u hebt gerookt
- ☐ Onmiddellijk nadat u oefeningen hebt gedaan of in bad bent geweest
 - Blijf ten minste 20 minuten rustig zitten voordat u een meting uitvoert.
- ☐ In een bewegend voertuig
- ☐ Op koude plaatsen
 - Voer metingen uit bij een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 40 °C.
- ☐ Als u moet urineren
 - Wacht na het urineren een paar minuten voordat u een meting uitvoert.

UW BLOEDDRUK METEN

Meting

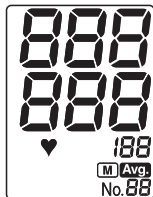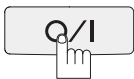


Het gehele display gaat circa 1 seconde branden.

- Als er lucht achterblijft in de drukmanchet, zal het display langer verlicht zijn.

1 Druk op de Start/Stop-knop.


- De drukmanchet wordt automatisch opgepompt en de meting wordt uitgevoerd.

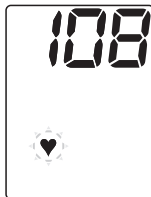

Het hartsymbool ♥ zal knipperen als tijdens het oppompen uw hartslag wordt gedetecteerd.

2 Nadat de meting is voltooid wordt de bloeddrukwaarde en de hartslag weergegeven.

- De druk wordt automatisch van de manchet gehaald.
- Als de gemeten waarde in het bereik van hoge bloeddruk valt, zullen de waarden knipperen (circa 6 seconden). (Zie pag. 8 voor informatie over hoe u het meetresultaat moet interpreteren)
- Het symbool (M) zal knipperen. (Zie pag. 9 voor informatie over het opslaan van meetresultaten)
- De hartslagwaarde is het aantal slagen per minuut dat tijdens de meting wordt berekend op basis van de gemeten hartslag.

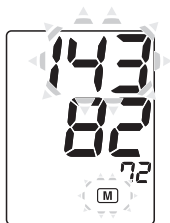


3 Druk op de Start/Stop-knop om het apparaat uit te zetten.

- Als u vergeet het apparaat uit te zetten, zal de bloeddrukmeter na circa 5 minuten automatisch worden uitgeschakeld.

Het meetresultaat interpreteren

Of de systolische en diastolische bloeddrukwaarden binnen het bereik van hoge bloeddruk of binnen het bereik van normale bloeddruk vallen, wordt bepaald aan de hand van de bloeddrukclassificaties van de WHO/ISH (Wereldgezondheidsorganisatie/ Internationale Vereniging voor Hypertensie), en de bloeddrukwaarde zal, indien nodig, knipperen.

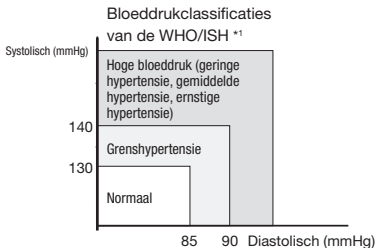

- Als de gemeten waarde in het bereik van hoge bloeddruk valt, zullen de waarden circa 6 seconden knipperen. (Alleen onmiddellijk na de meting)
- **Systolische bloeddruk: 140mmHg of hoger**
- **Diastolische bloeddruk: 90mmHg of hoger**

Indien de meting niet goed kon worden uitgevoerd



Het symbool **E** wordt weergegeven om aan te geven dat de meting opnieuw moet worden uitgevoerd

Als u achter elkaar meerdere metingen uitvoert, druk de Start/Stop-k nop dan eenmaal in om de bloeddrukmeter uit te zetten en blijf daarna 4 tot 5 minuten stilzitten, en verricht daarna de volgende meting.

Advies:


Bij de tweede meting bent u meestal minder gespannen en voelt u zich meer relaxed, waardoor de bloeddrukwaarde lager zal zijn.

Voor mensen die gemakkelijk gestresst raken, is het zeer effectief om twee metingen te verrichten. Bij twee metingen wordt normaliter de lagere waarde opgeslagen. Als u twee metingen wilt verrichten, blijf dan na de eerste meting altijd 4 tot 5 minuten stilzitten voordat u de tweede meting uitvoert.

^{1*} Richtlijnen uit 1999 voor de behandeling van hoge bloeddruk van de Wereldgezondheidsorganisatie-Internationale Vereniging voor Hypertensie

MEETWAARDEN OPSLAAN



Dit apparaat kan 42 meetresultaten opslaan.

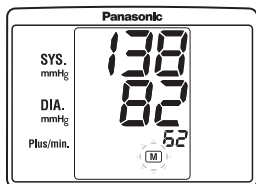

Druk na de meting op de Geheugen/oproepknop terwijl het symbool **M** knippert.

De gegevensopslag is voltooid.

- U kunt tot 42 meetwaarden opslaan. Als het geheugen vol is en u meer meetresultaten wilt opslaan, wordt het oudste meetresultaat uit het geheugen verwijderd en het nieuwe meetresultaat opgeslagen.
- U kunt geen meetresultaten opslaan als de meting niet met succes werd uitgevoerd (in plaats van de bloeddrukwaarde wordt het symbool **E** weergegeven).
- * Als het symbool **E** wordt weergegeven voor de hartslagwaarde, dan kan de bloeddrukwaarde echter nog wel worden opgeslagen.

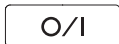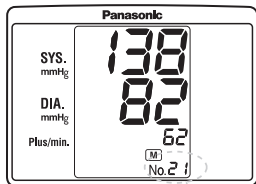

Aantal opgeslagen meetresultaten

U verwijderd alle meetresultaten als volgt uit het geheugen:

1. Druk op de Geheugen/oproepknop om de opgeslagen meetresultaten op te roepen.
 2. Druk nogmaals op de Geheugen/oproepknop en houd deze (langer dan circa 3 seconden) ingedrukt totdat de meetresultaten verdwijnen.
- * Het is niet mogelijk om meetresultaten afzonderlijk te verwijderen.




Druk op Start/Stop-knop om het apparaat uit te zetten.

- Als u vergeet het apparaat uit te zetten, zal de bloeddrukmeter na circa 5 minuten automatisch worden uitgeschakeld.

OPGESLAGEN MEETRESULTATEN OPROEPEN


U kunt meetresultaten oproepen nadat de meting is voltooid of nadat de stroom werd uitgeschakeld.

Er wordt geen waarde weergegeven als er geen meetresultaten zijn opgeslagen.

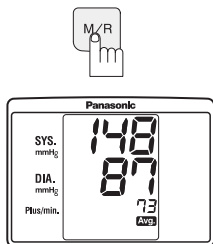

- 1 Druk** op de Geheugen/oproepknop.
Op het display verschijnt het gemiddelde van alle meetresultaten die in het geheugen zijn opgeslagen.

- Aan de onderzijde van het display wordt het symbool **Avg.** weergegeven.
- Als er bijvoorbeeld 21 meetresultaten zijn opgeslagen, wordt het gemiddelde van 21 metingen getoond. (Het symbool **Avg.** wordt niet getoond als slechts 1 meetresultaat is opgeslagen.)

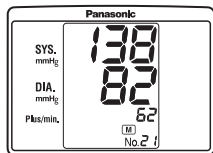

- 2 Druk** nogmaals op de Geheugen/oproepknop.
Telkens wanneer u op de Geheugen/oproepknop drukt, worden achtereenvolgens de eerder opgeslagen meetresultaten weergegeven, te beginnen met het laatst opgeslagen meetresultaat.

LET OP: Druk heel kort op de Geheugen/oproepknop. Als u de knop langer dan circa 3 seconden ingedrukt houdt, worden alle gegevens uit het geheugen verwijderd.




- 3 Druk** op de Start/Stop-knop als u wilt stoppen met het oproepen van de opgeslagen meetresultaten.

- Als u vergeet het apparaat uit te zetten, zal de bloeddrukmeter na circa 5 minuten automatisch worden uitgeschakeld.

NA GEBRUIK/SPECIFICATIES

Opbergen

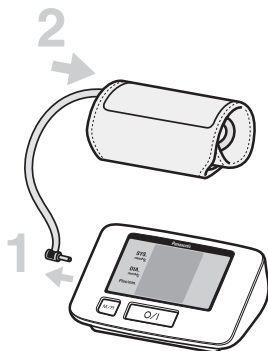

1 Haal de stekker uit de hoofdeenheid.

2 Rol de drukmanchet losjes op, en **berg** de slang op binnen de drukmanchet.

- Wikkel de slang niet om de hoofdeenheid, etc. Als u dat wel doet, wordt mogelijk te veel kracht uitgeoefend op de slang, en kan een defect ontstaan.
- Verbuig de slang niet.

Specificaties

Stroombron	DC 6V 4 x 1,5V (LR6/AA/Mignon/alkaline)
Display	Digitale LCD
Meetmethode	Oscillometrisch systeem
Meetbereik	Bloeddruk: 0 tot 280mmHg Hartslag: 30 tot 160 slagen per minuut
Nauwkeurigheid	Bloeddruk: Binnen ± 3 mmHg Hartslag: Binnen $\pm 5\%$
Bereik temperatuur en vochtigheid bij gebruik	10 tot 40 °C, 30 tot 85% RH
Bereik temperatuur en vochtigheid bij opslag	-10 tot 60 °C, 10 tot 95% RH
Omtrek meetarm	Circa. 20 tot 34 cm
Gewicht	Circa 285 gram (zonder batterijen)
Afmetingen	15,0 x 11,0 x 6,8 cm

MEETNAUWKEURIGHEID

Algemeen

Deze bloeddrukmeter voldoet aan de Europese voorschriften (EU-richtlijn 93/42/EG gedateerd 14 juni, 1993) en draagt het CE-keurmerk "CE 0197". De kwaliteit van het apparaat is geverifieerd en het apparaat voldoet aan de volgende normen:

EN 1060-1 (Dec. 1995)	Niet-invasieve bloeddrukmeters Algemene eisen
EN 1060-3 (Sep. 1997)	Niet-invasieve bloeddrukmeters Aanvullende eisen voor elektro-mechanische bloeddrukmeetsystemen
EN 1060-4 (Sep. 2004)	Niet-invasieve bloeddrukmeters Beproevingprocedures voor totale nauw- keurigheidsbepaling van de automatische niet-invasieve bloeddrukmeters.
EN 60601-1-2 (Nov. 2001)	Elektromagnetische compatibiliteit en veilig- heid voor medische elektrische toestellen

Het CE-keurmerk dient om het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten van de EU te vergemakkelijken.

Panasonic garandeert een nauwkeurige meting

Het zegel bevestigt dat in de fabriek van Matsushita is gecontroleerd of elk apparaat nauwkeurig meet.

Het verdient aanbeveling om het apparaat om de 3 jaar opnieuw te kalibreren, te beginnen met het jaar dat op het zegel is gedrukt.

CALIBRATED UNTIL

2008

Als het apparaat is gerepareerd of het zegel onleesbaar is geworden, dan moet u ervan uitgaan dat het apparaat onnauwkeurig is. In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling het apparaat opnieuw te laten kalibreren.

VRAGEN & ANTWOORDEN

V **Waarom zijn de bloeddrukwaarden van metingen die thuis zijn uitgevoerd verschillend van metingen die bij de arts zijn uitgevoerd?**

A De bloeddruk varieert 24 uur per dag.

De bloeddruk kan verder in grote mate afhangen van het weer, uw mentale toestand, oefeningen, etc.

Dan is er ook nog specifiek het verschijnsel “witte jassen hoge bloeddruk”. Dit betekent dat de bloeddruk die wordt gemeten in de praktijk van de arts vaak hoger is als gevolg van stress of zorgen.

Ook is het zo dat als de bloeddruk die u thuis meet, soms hoger en soms lager is dan de bloeddruk die wordt gemeten bij uw arts. U moet dan letten op de volgende punten. Houd daar rekening mee als u een meting uitvoert.

① Is de drukmanchet stevig om uw arm gewikkeld?

- Let erop dat de drukmanchet niet te los en niet te strak om uw arm is gewikkeld.
- Is de drukmanchet om uw bovenarm gewikkeld? Zorg ervoor dat de drukmanchet niet gedeeltelijk om uw elleboog is gewikkeld.


Raadpleeg pagina 4 voor informatie over hoe u de drukmanchet juist moet aanbrengen

② Hebt u zorgen of bent u geïrriteerd?

Haal 2 tot 3 keer diep adem en ontspan uzelf voordat u de meting uitvoert. Daardoor stabiliseert u uw bloeddruk. Daarnaast verdient het aanbeveling dat u circa 4 tot 5 minuten rustig stilzit voordat u een meting uitvoert.

V **Waarom zijn de gemeten bloeddrukwaarden telkens verschillend als ik een meting heb uitgevoerd?**


A

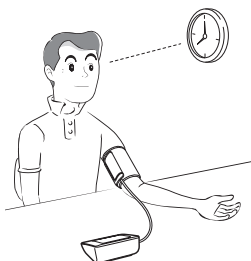

- ① De bloeddruk verandert zelfs binnen één enkele dag en hangt af van de houding die u tijdens het meten aanneemt. Daarom moet u een meting altijd uitvoeren onder dezelfde omstandigheden.
- ② Bij personen die bloeddrukmedicijnen innemen, kan de bloeddruk vanwege de effecten van de medicatie in sterke mate veranderen.
- ③ Als u achtereenvolgens twee metingen wilt verrichten, blijf dan na de eerste meting 4 tot 5 minuten stilzitten voordat u de tweede meting uitvoert.

V **Waarom is het meetresultaat tussen de linkerarm en rechterarm verschillend?**

A

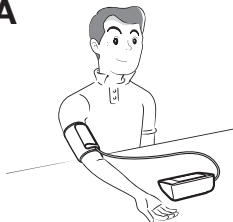

Er wordt gezegd dat het verschil in bloeddruk tussen de linkerarm en rechterarm circa 10mmHg kan bedragen. De bloeddruk kunt u meten aan de linkerarm of rechterarm, maar u moet wel alle metingen uitvoeren aan dezelfde arm.

BEHANDELING VAN HET APPARAAT

Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of te veranderen. Hierdoor kan brand ontstaan of kan het apparaat defect raken. Ook letsel kan hiervan het gevolg zijn.

Oefen op het apparaat niet te veel kracht uit.
Laat het apparaat niet vallen.

De meting kan worden belemmerd als het apparaat dicht in de buurt van televisies, magnetrons, röntgenapparatuur of andere apparaten met sterke elektrische velden wordt gebruikt.

Meet uw bloeddruk op voldoende afstand van dergelijke apparaten of schakel de betreffende apparaten uit.

De manchet kan bij temperaturen onder 0°C in enige mate zijn elasticiteit verliezen. Als het apparaat blootstaat aan dergelijke extreme temperaturen, dan is het aan te bevelen het apparaat te laten liggen totdat het is opgewarmd tot kamertemperatuur voordat u de volgende meting uitvoert. In principe dient het apparaat niet te worden blootgesteld aan extreme omstandigheden (koude, hitte, vochtigheid, stof).

Laat stof of andere vreemde objecten niet in het object binnendringen, omdat het apparaat anders defect kan raken.

Het apparaat reinigen

- Gebruik alleen een doek met een beetje warm water en zeep om het apparaat schoon te vegen.
- Gebruik geen verdunners, benzeen of alcohol op het apparaat, omdat anders het apparaat kan verkleuren of scheuren kunnen ontstaan.
- De manchet mag u niet wassen.

Opbergen

- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid en direct zonlicht omdat het apparaat anders defect kan raken.

Het apparaat langere tijd opbergen

- Verwijder de batterijen voordat u het apparaat langere tijd opbergt. Als u dat nalaat, kunnen de batterijen gaan lekken, waardoor het apparaat defect kan raken.

VOOR UW VEILIGHEID

Houd u altijd aan de voorschriften van uw arts als u medicijnen gebruikt.

Vraag aan uw arts wat het beste tijdstip is om uw bloeddruk te meten als u medicijnen gebruikt.

Mensen met pacemakers voor het hart, hartritmestoornissen, vaatvernauwing of leveraandoeningen evenals diabetici moeten hun arts raadplegen voordat zij zelf hun bloeddruk meten, omdat in dergelijke gevallen mogelijk verschillende waarden worden gemeten. Hetzelfde geldt ook voor vrouwen die in verwachting zijn.

De Diagnostec is geen speelgoed voor kinderen!

Als u de bloeddruk meet van uw kind, raadpleeg dan altijd uw arts omdat de gegevens niet kunnen worden vergeleken met die van de standaardgegevens van volwassenen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Display	Situatie voordat de fout optrad	Oorzaak en oplossing	Als het probleem aanhoudt
Op het display wordt symbool  (om aan te geven dat een meting opnieuw moet worden uitgevoerd) weergegeven. 	De druk is opgebouwd tot meer dan 280mmHg.	Is de meting uitgevoerd volgens de juiste procedure en in de juiste houding? Zie pagina 4 en 5	
	De druk is plotseling afgenomen en het symbool  (om de meting opnieuw uit te voeren) is verschenen.		
	De meting werd uitgevoerd tot 20mmHg en vervolgens verscheen het symbool  (om aan te geven dat de meting opnieuw moet worden uitgevoerd).	Hebt u de drukmanchet goed om uw arm gewikkeld? Zie pagina 4	
	Het hartsymbool  heeft slechts een paar keer of helemaal niet geknipperd.	De slang is mogelijk niet goed aangesloten. Controleer de slang-aansluiting. Zie pagina 4.	
	De druk wordt niet opgebouwd, ook niet nadat een tiental seconden is gewacht.		
Symptoom	Mogelijke oorzaak	Als het probleem aanhoudt	
De systolische of diastolische bloeddrukwaarde is hoog of laag.	- De drukmanchet is te laag aangebracht. - De drukmanchet is niet op de juiste wijze om uw arm gewikkeld. - De drukmanchet is te hoog aangebracht. - U hebt zich tijdens de meting bewogen of u hebt tijdens de meting gepraat. Zie pagina 4 en 5.	Vraag uw arts om advies	
De bloeddruk is abnormaal hoog of abnormaal laag.	Bij elke meting hebt u een andere houding aangenomen. Zie pagina 5.		
De bloeddrukwaarde verschilt van de bloeddrukwaarde die bij de arts is gemeten.	- De bloeddruk varieert in reactie op kleine veranderingen in uw mentale toestand, zoals uw reactie op de aanwezigheid van een arts. - Blijf 4 tot 5 minuten stilzitten en voer daarna een volgende meting uit. Zie pagina 5		
Bij elke meting is het meetresultaat verschillend.			
Ook als de Start/Stop-knop wordt ingedrukt, verschijnen geen gegevens op het display.	- De batterijen zijn leeg. - De batterijen zijn zo geplaatst dat de plus- en minzijde van de batterijen aan de verkeerde kant liggen. Zie pagina 2 en 3		
Nadat de Start/Stop-knop werd ingedrukt, gingen alle display-gegevens branden en daarna verdwenen deze.			
Het apparaat is gebroken.	Laat het testen en repareren in de winkel waar u het hebt gekocht.		

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- * Lees de “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” voordat u het apparaat in gebruik neemt en zorg ervoor dat u het apparaat op de juiste wijze gebruikt.
- * De veiligheidsaanwijzingen in dit gedeelte zijn bedoeld om u te instrueren hoe u dit apparaat op de juiste wijze moet gebruiken en om te voorkomen dat een gevaarlijke situatie ontstaat of aan uzelf of anderen letsel wordt toegebracht..

Alle veiligheidsaanwijzingen bevatten belangrijke instructies ten aanzien van de veiligheid, welke dienen te worden nageleefd.

WAARSCHUWING: De dood of ernstig letsel kan het gevolg zijn als u de veiligheidsaanwijzing niet naleeft.

VOORZICHTIG: Als u de veiligheidsaanwijzing niet naleeft, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING:

- Personen die lijden aan ernstige obstructies in de bloedstroom van de arm, moeten een arts raadplegen voordat zij dit apparaat mogen gebruiken. De fysieke conditie kan anders verslechteren.
- Laat dit apparaat niet gebruiken door kinderen.
- Laat dit apparaat niet gebruiken door mensen die hun gevoelens niet kunnen uitdrukken of die het apparaat niet zelf kunnen bedienen. Anders kunnen er ongelukken gebeuren of mensen gewond raken.

VOORZICHTIG:

- Als dit apparaat niet of vreemd werkt, stop het gebruik dan onmiddellijk en laat het apparaat vervolgens inspecteren en eventueel repareren. Als u dat nalaat, kan er brand ontstaan, kunt u bloot komen te staan aan elektrische schokken of kunt u brandwonden oplopen.
- Beoordeel het meetresultaat niet naar uw eigen inzicht en doe niet aan zelfbehandeling.
- Voer metingen uit volgens de instructies van uw arts en laat uw arts een diagnose geven van het resultaat.
- Neem medicijnen in volgens de instructies van uw arts.
- Gebruik het apparaat alleen voor het meten van uw bloeddruk en nergens anders voor. Anders kunnen er ongelukken gebeuren of defecten optreden.
- U mag het apparaat nooit zelf demonteren of proberen te repareren. Anders kan er vanwege een abnormale werking brand ontstaan of kunt u als gevolg daarvan letsel oplopen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Panasonic Electric Works Sales Western Europe B.V.

Vertegenwoordiging EU: Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Straße 43, D-65203, WIESBADEN, Duitsland

Wettelijke producent: Matsushita Electric Works, Ltd.
33 Okamachi, Hikone, Shiga 522-8520, Japan